

**NEU**  
Jetzt mit zusätzlichen  
Produktvarianten

# Kompressionssysteme für die Entstauung

Therapiekonzept für eine  
gezielte Ödemversorgung



# Kompressionssysteme für die Entstauung

## Selbstbandagierung

Der Patient aktiv in der Ödemtherapie	04
Aufklärung und Schulung des Patienten	05
Innovative Hilfen für die ergänzende Selbstbandagierung	05

## Juzo SoftCompress

Kompressionsbandagierung	07
Bandagehilfen	08
LymphAid und BandageAid	10
Kompressionsbinde und Kompressionsplatte	13
Zusatzprodukte	14

## Medizinische adaptive Kompressionssysteme

Medizinische adaptive Kompressionssysteme	19
---	----

## Juzo ACS Light

Segmente für die untere Extremität	21
Segmente für die obere Extremität	24
Zubehör	26

## Juzo Compression Wrap

Segmente für die untere Extremität	29
Segmente für die obere Extremität	32

## Ergänzende Produkte

Juzo Liner	34
Juzo Liner Silver	35
Unterstützende Produkte für die Ödemtherapie	37

## Wichtige Informationen

Zusätzliche Informationen	36
Kontraindikationen	36

# Selbstbandagierung

## Der Patient aktiv in der Ödemtherapie

Die Standardtherapie des Lymphödems ist die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), die gemäß der am 23. Mai 2017 veröffentlichten medizinischen Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Lymphödeme“ um einen neuen Baustein ergänzt worden ist. Neu ist die aktive Einbindung des Patienten: Die Aufklärung und Schulung zur individuellen Selbsttherapie wurde als fünfte Komponente in die KPE mit aufgenommen. Alle Maßnahmen der KPE (Manuelle Lymphdrainage (MLD), Kompressionstherapie, entstauende Bewegungs- und Atemtherapie, Hautpflege und Hautsanierung) sollen aufeinander abgestimmt und in Kombination angewendet werden – denn nur gemeinsam sichern sie den langfristigen Therapieerfolg.



Die KPE ist eine 2-Phasen-Therapie: Phase 1 (Entstauungsphase) bezweckt die Mobilisierung des Ödems – in Phase 2 (Erhaltungsphase) wird der Therapieerfolg konserviert und optimiert. Die Mithilfe und das Mitwirken des Patienten sind in jeder Phase sowie bei jeder der einzelnen KPE-Maßnahmen wichtig.

Es gilt, die Beschwerden zu lindern, die Lebensqualität zu verbessern, die Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben zu ermöglichen und Komplikationen vorzubeugen. Die Kombination der KPE mit der Aufklärung und Schulung zum Selbstmanagement sichert den langfristigen Behandlungserfolg. Dabei ist die effektive Zusammenarbeit zwischen Arzt, Lymphtherapeut, medizinischem Fachhandel und betroffenem Patient maßgeblich.

### Phase 1: Entstauungsphase

In Phase 1 der Therapie werden alle Bausteine der KPE möglichst 1–2x täglich angewandt. Die Aufklärung, Schulung und Einbindung des Patienten in die Behandlung ist in dieser Phase besonders wichtig, denn die Maßnahmen sind zeitintensiv und erfordern die aktive Mitwirkung des Betroffenen.

### Phase 2: Erhaltungsphase

In Phase 2 werden die Bausteine der KPE je nach Befund und Beschwerden eingesetzt. Abhängig vom Krankheitsverlauf kann es sein, dass die Phase 1 wiederholt werden muss – insbesondere bei zwischenzeitlich auftretenden Erkrankungen. Auch in dieser zweiten Phase sollte der betroffene Patient entsprechend mitwirken.

## Aufklärung und Schulung des Patienten

Entscheidend für den Erfolg der KPE ist, dass der Patient über seine Erkrankung aufgeklärt und informiert wird. Zu Beginn der Therapie sind schriftliche Informationen sinnvoll – hier bietet Juzo leicht verständliche kostenlose Broschüren und Online-Informationen für Patienten und Angehörige an. Wenn der Patient das Krankheitsbild verstanden und akzeptiert hat, wird es einfacher, mit ihm über die Möglichkeiten zu sprechen, die er als Betroffener hat. Denn auch er selbst kann durch eigenes Handeln sein Krankheitsbild verbessern und seine Beschwerden lindern. In manchen Fällen kann eine psychologische Begleitung oder der Besuch einer

Selbsthilfegruppe sinnvoll sein. Im Rahmen von Patientenschulungen können spezifische Fragen zur Erkrankung und zu den einzelnen Therapie-Bausteinen beantwortet werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist das Erlernen des Anlegens von lymphologischen Kompressionsverbänden: die Selbstbandagierung. Neben der Kompressionstherapie, die der Betroffene so aktiv unterstützen kann, gibt es zusätzliche Möglichkeiten zur Eigenbehandlung. Dazu gehören beispielsweise die richtige Hautpflege, Atemtechniken und Entstauungsgymnastik, die in Patienten-Trainings erlernt werden können.

Die Eigenbehandlung durch den Patienten ist eine ergänzende Maßnahme zu den in der medizinischen Leitlinie definierten KPE-Bausteinen. Sie ersetzt nicht die Manuelle Lymphdrainage mit Kompressionstherapie durch Therapeuten bzw. die Kompressionsbestrumpfung durch den medizinischen Fachhandel. Alle Maßnahmen sollten Hand-in-Hand erfolgen, um einen Langzeiterfolg der Ödemtherapie zu ermöglichen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

## Innovative Hilfen für die ergänzende Selbstbandagierung

Juzo bietet eine Vielzahl von Produkten für die Eigentherapie, die durch einfache und schnelle Anwendung sowie effektive Wirkung zu einer spürbaren Steigerung der Lebensqualität beitragen.

Insbesondere für die Anwendung durch den Patienten während der Entstauungsphase oder bei weiterem Bedarf in der Erhaltungsphase eignen sich die Juzo ACS Light und Compression Wrap Produkte sowie die Juzo SoftCompress Bandagehilfen. Diese Produkte sind praktisch in der Anwendung und in jeder Phase der KPE zur Unterstützung des Behandlungserfolges geeignet.

Die medizinischen adaptiven Kompressionssysteme (Juzo ACS Light und Juzo Compression Wrap) können mit Klettverschlüssen individuell an den Patienten angepasst werden. Die Produkte sind einfach in der Handhabung und können schnell an den Beinen oder Armen angelegt werden. Der Erfolg der Entstauungstherapie kann durch den Einsatz von Juzo SoftCompress deutlich gesteigert werden. Durchdachte Produktdetails sorgen für eine optimale Druckübertragung und vermeiden zu starke Scher- und Reibkräfte beispielsweise an sensiblen Körperstellen.

Diese innovativen Produkte lassen sich abhängig von Krankheitsbefund und körperlichen Gegebenheiten der Patienten gezielt und effizient einsetzen. Einige davon sind auch als Maßanfertigungen mit individueller Passform erhältlich. Durch zahlreiche auf die Kompressionsversorgung abgestimmte Zusatzprodukte von Juzo, wie z. B. verschiedene An- und Ausziehhilfen oder Lymph Lotion für die tägliche Pflege der Haut, wird die Anwendung erleichtert.

Um eine Ödemtherapie dauerhaft erfolgreich durchführen zu können, bedarf es Produktlösungen, die sich durch schnelle und unkomplizierte Anwendung auszeichnen.





# Juzo SoftCompress

## Kompressionsbandagierung

Bei Kompressionsverbänden beugt eine Unterpolsterung Druckstellen und Hautschäden vor und kann zudem die Lebensqualität fördern<sup>1</sup>. Mit den Polstermaterialien von Juzo SoftCompress kann der Erfolg der Entstauungstherapie zudem deutlich gesteigert werden. Denn die vertikal verlaufenden Schaumstoffkanäle bilden eine einzigartige Oberflächenstruktur, die den Abfluss der Lymphflüssigkeit unterstützt. Die Bandagehilfen und Zusatzprodukte zeichnen sich, im Gegensatz zu häufig verwendeten Synthetikmaterialien, durch eine besonders hautfreundliche Baumwolloberfläche aus. Diese ermöglicht einen angenehmen Tragekomfort für den Patienten. Zudem ermöglichen die Juzo SoftCompress Bandagehilfen dem Patienten eine einfache Eigenanwendung und sichern somit den Therapieerfolg langfristig.

### Eigenschaften

- + Kern aus hochwertigem Schaumstoff
  - Optimale Druckübertragung
  - Ideale Druckverteilung
- + Vertikal genähte Schaumstoffkanäle
  - Steigerung des Lymphabflusses
  - Effektiv gegen Bindegewebsfibrosen
- + Besondere Hautverträglichkeit durch Baumwolloberfläche
  - Atmungsaktiv
  - Anschmiegsam
- + Abschnürung in Gelenkbeugen wird verhindert
- + Schützt vor dem Einschneiden durch Bindenkanten
- + Zeitersparnis bei der Bandagierung
- + Erleichterung der Selbstbandagierung
- + Waschbar bis zu 60 °C
- + Bei niedriger Temperatur trocknergeeignet
- + Desinfektion und Aufbereitung möglich – dadurch langfristig kostensparend<sup>2</sup>
- + **Juzo SoftCompress Bandagehilfen können unter Kurzzugbinden oder in Verbindung mit medizinischen adaptiven Kompressionssystemen getragen werden**

### Indikationen

- Lymphödem
- Lipödem
- Phlebödem
- Posttraumatisches Ödem
- Postoperatives Ödem
- Fibrosen

### Materialzusammensetzung

- Bezug: 100 % Baumwolle
- Schaumstoff: 100 % Polyurethan

### Kontraindikationen

Siehe Seite 36

### Farbe



Weiß



Mit Baumwolle



Waschbar  
60 Grad



### Schaumstoffkanäle

Die vertikal genähten Schaumstoffkanäle fördern den Lymphabfluss und helfen, Fibrosen aufzulockern.



### Wirkungsweise

Sichtbare Wirkungsweise der Juzo SoftCompress Bandagehilfe beim Beinlymphödem.

<sup>1</sup> Protz et al.. Kompressionsbandagierungen mit und ohne Unterpolsterung im Vergleich. Vasomed 2019; 31(3) 132-133.

<sup>2</sup> Die Produkte wurden gemäß DIN ISO TS 15883-5, SOD 19-002, EN ISO 17664, SOD 19-01 und der Richtlinie des Robert-Koch-Institutes „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ erfolgreich geprüft.

# Bandagehilfen

Die komfortablen Juzo SoftCompress Bandagehilfen können in der Phase 1 der KPE unter Kurzzugbinden oder in der Phase 2 unter medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (Juzo ACS Light oder Juzo Compression Wrap) getragen werden und sorgen für zusätzliche Kompression und Polsterung sowie eine ideale Druckverteilung. Durch die Verwendung der Bandagehilfen wird das Bandagieren schneller sowie effektiver und erleichtert auch dem Patienten die Selbstbandagierung. Sie sind erhältlich in Universalgrößen, Seriengrößen und als Maßanfertigungen.

## Für KPE Phase 1



### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Unterschenkel

Universalgröße  
Art. 6831



### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Bein

Universalgröße  
Art. 6821



### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Arm

Universalgröße  
Art. 6823

#### Universalgröße

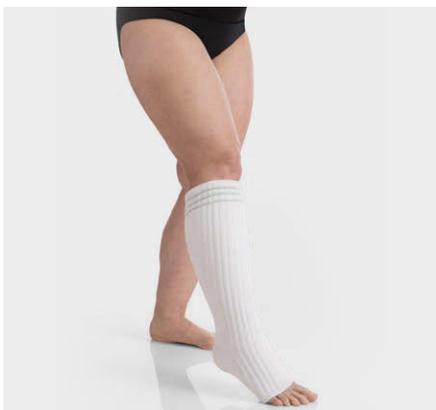
Bandagehilfen in Universalgröße sind an der Rückseite offen und werden mit Hilfe von Klettbindern bzw. einem elastischen Textilschlauch fixiert. Dadurch lässt sich die Bandagehilfe während der Therapie individuell auch an stark schwankende Umfangmaße anpassen.

**Serien- und Universalgrößen** sind an den entsprechenden Schnittmarkierungen kürzbar.

**Achtung:** Vor dem Kürzen zwischen den Quernähten muss das Produkt einmal gewaschen und vor dem Trocknen im nassen Zustand längsgedehnt worden sein.



## Für KPE Phase 2



### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Unterschenkel

Seriengrößen und nach Maß  
Art. 6830



### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Bein

Nach Maß  
Art. 6820



### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Arm

Seriengrößen und nach Maß  
Art. 6822

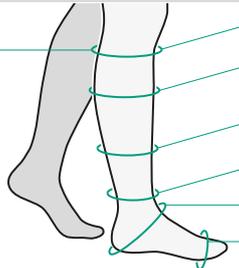
## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN		
		Seriengrößen	Maßanfertigung	Universalgröße
	<b>6831</b> <b>Bandagehilfe Unterschenkel</b> (für KPE Phase 1) inkl. 2 Pelotten für die Fußknöchel	–	–	13505730
	<b>6830</b> <b>Bandagehilfe Unterschenkel</b> (für KPE Phase 2)	Größe 1 · 13505687 Größe 2 · 13505693 Größe 3 · 13505701 Größe 4 · 13505718 Größe 5 · 13505724	keine PZN	–
	<b>6821</b> <b>Bandagehilfe Bein</b> (für KPE Phase 1) inkl. Bandagehilfe Unterschenkel Universal 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle 1 Kompressionsbinde (10 cm x 4 m) 1 Kompressionsbinde (12 cm x 4 m)	–	–	13505641
	<b>6820</b> <b>Bandagehilfe Bein</b> (für KPE Phase 2) inkl. 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	–	keine PZN	–
	<b>6823</b> <b>Bandagehilfe Arm</b> (für KPE Phase 1) inkl. 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	–	–	13505842
	<b>6822</b> <b>Bandagehilfe Arm</b> (für KPE Phase 2) inkl. 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	Größe 1 · 13505747 Größe 2 · 13505753 Größe 3 · 13505782 Größe 4 · 13505799 Größe 5 · 13505807 Größe 6 · 13505836	keine PZN	–

KPE = Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

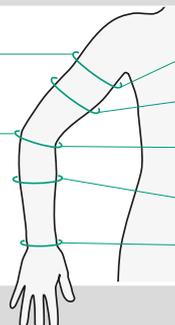
## Größentabellen Seriengrößen

### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Unterschenkel

Art. 6830 Länge in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm				
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	<b>cD</b> 27,0 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0
<b>PD</b> 38,0 – 46,0	<b>cC</b> 29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5
	<b>cB'</b> 23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	32,5 – 35,5
	<b>cB</b> 18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5
	<b>cY</b> 28,0 – 30,5	29,0 – 31,5	31,0 – 34,0	33,0 – 36,0	35,0 – 38,5
	<b>cA</b> 18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5

**WICHTIG:** Seriengrößen werden nach Hautmaß ermittelt. Für Maßanfertigungen bitte „auf Zug“ messen.

### Juzo SoftCompress Bandagehilfe Arm

Art. 6822 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	<b>cG</b> 30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5	40,0 – 44,0
<b>PG</b> 46,0 – 51,0	<b>cF</b> 28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5
<b>PE</b> 21,0 – 25,0	<b>cE</b> 25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	<b>cD</b> 23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	<b>cC</b> 14,5 – 16,0	16,0 – 17,5	17,5 – 19,0	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 24,0

# LymphAid und BandageAid

Die Komplettlösung für die lymphologische Kompressionsbandagierung bieten die Juzo SoftCompress Varianten Lymph- und BandageAid. Gegenüber herkömmlichen Sets beinhalten diese zusätzlich die innovativen Juzo SoftCompress Materialien, durch deren Einsatz der Therapieerfolg deutlich gesteigert werden kann. LymphAid ist mit einer vorgefertigten Bandagehilfe ausgestattet und eignet sich dadurch auch für die Selbstbandagierung. Die kostengünstigere BandageAid beinhaltet die Juzo SoftCompress Kompressionsbinden.

## LymphAid



**Juzo SoftCompress  
LymphAid Bein klein**  
Art. 6800 KL



**Juzo SoftCompress  
LymphAid Bein groß**  
Art. 6800 GR



**Juzo SoftCompress  
LymphAid Arm**  
Art. 6801

## BandageAid



**Juzo SoftCompress  
BandageAid Bein klein**  
Art. 6810 KL



**Juzo SoftCompress  
BandageAid Bein groß**  
Art. 6810 GR



**Juzo SoftCompress  
BandageAid Arm**  
Art. 6811



Kurzvideos zur Bandagierung mit Juzo SoftCompress finden Sie unter [www.juzo.de/softcompress](http://www.juzo.de/softcompress)

## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN Universalgröße
	<b>6800 KL</b> <b>LymphAid Bein klein</b> (für KPE Phase 1)	
	1 Bandagehilfe Unterschenkel Universalgröße 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 8 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel	13506244
	<b>6800 GR</b> <b>LymphAid Bein groß</b> (für KPE Phase 1)	
	1 Bandagehilfe Unterschenkel Universalgröße 1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 1 Kompressionsbinde 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 8 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 6 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	13506238
	<b>6801</b> <b>LymphAid Arm</b> (für KPE Phase 1)	
	1 Bandagehilfe Arm Universalgröße 20 Rapidelast V – Mullbinden 6 cm x 4 m 2 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m 2 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	13506221
	<b>6810 KL</b> <b>BandageAid Bein klein</b> (für KPE Phase 1)	
	1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel	13505670
	<b>6810 GR</b> <b>BandageAid Bein groß</b> (für KPE Phase 1)	
	1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 2 Kompressionsbinden 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 4 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 3 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 4 Kurzzugbinden 12 cm x 5 m 2 Pelotten für die Fußknöchel 1 Einlage für die Kniekehle	13505664
	<b>6811</b> <b>BandageAid Arm</b> (für KPE Phase 1)	
	1 Kompressionsbinde 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – Mullbinden 6 cm x 4 m 1 Kurzzugbinde 6 cm x 5 m 1 Kurzzugbinde 8 cm x 5 m 5 Kurzzugbinden 10 cm x 5 m 1 Handkomresse 1 Einlage für die Ellenbeuge	13505658

KPE = Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

Die in LymphAid und BandageAid befindlichen Mull- und Kurzzugbinden sind Qualitätsprodukte der Karl Otto Braun GmbH & Co. KG (KOB). Sie sind auch separat bei Juzo erhältlich.



# Kompressionsbinde und -platte

Die Juzo SoftCompress Bandagematerialien werden für die lymphologische und phlebologische Kompressionsbandagierung verwendet. Dank der weichen Oberfläche sind sie sehr anschmiegsam, hautfreundlich und atmungsaktiv.



## Juzo SoftCompress Kompressionsbinde

Art. 6835

Die dünnen, anschmiegsamen Juzo SoftCompress Kompressionsbinden erzeugen durch entsprechendes Anlegen bereits einen Kompressionsdruck. Die Kompressionsbinden verteilen den Druck der zusätzlich darüber aufgetragenen Kurzzugbinden gleichmäßig und verhindern dadurch Einschnürungen.



## Juzo SoftCompress Kompressionsplatte

Art. 6836

Die Kompressionsplatten können individuell zugeschnitten werden und sind somit in verschiedenen Körperregionen einsetzbar. Es wird empfohlen, die Schnittkanten abzunähen.

## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN Seriengrößen
<b>6835</b>	<b>Kompressionsbinde</b> (für KPE Phase 1)	
	5 mm, 8 cm x 4 m 5 mm, 10 cm x 4 m 5 mm, 12 cm x 4 m 5 mm, 16 cm x 4 m	Größe 1 · 13506043 Größe 2 · 13506066 Größe 3 · 13506072 Größe 4 · 13506089
<b>6836</b>	<b>Kompressionsplatte</b> (für KPE Phase 1)	
	65 x 65 cm 125 x 100 cm	Größe 1 · 13506095 Größe 2 · 13506103

KPE = Komplexe Physikalische Entstauungstherapie

## Größentabellen

### Juzo SoftCompress Kompressionsbinde

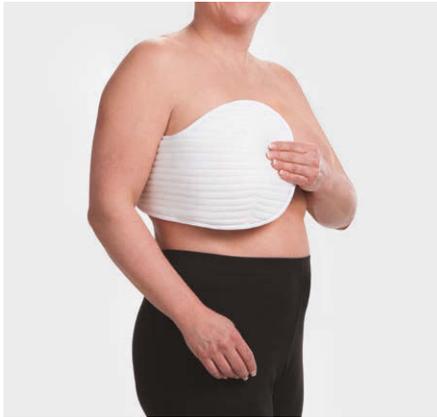
Art. 6835	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
Stärke in mm: 5,0  	1	400,0 x 8,0
	2	400,0 x 10,0
	3	400,0 x 12,0
	4	400,0 x 16,0

### Juzo SoftCompress Kompressionsplatte

Art. 6836	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	65,0 x 65,0
	2	125,0 x 100,0

# Zusatzprodukte

Juzo SoftCompress Einlagen bzw. Pelotten können unter Kompressionsbandagen oder -bekleidung getragen werden. Sie eignen sich besonders zur gezielten Druckerhöhung bei speziell lokalisierten Ödemen.



## Juzo SoftCompress Brusttrichter

Art. 6837

Der Juzo SoftCompress Brusttrichter dient als angenehme Einlage für Kompressions-BHs bzw. Thoraxbandagen, z. B. bei Brust- oder Thoraxwandödemen.



## Juzo SoftCompress Brustbandage

Art. 6838

Die Juzo SoftCompress Brustbandage kombiniert die positiven Eigenschaften des Juzo SoftCompress Materials mit einem Kompressions-BH. Der Brustumfang der Bandage ist verstellbar. Anwendbar ist die Brustbandage z. B. bei Brust- oder Thoraxwandödemen.



## Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Frauen

Art. 6839

Die Juzo SoftCompress Einlage für den weiblichen Genitalbereich wird in eine Kompressionsstrumpfhose eingelegt. Dies sorgt bei Genitalödemen für eine gezielte Druckerhöhung und Polsterung sowie ideale Druckverteilung.



## Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Männer

Art. 6840

Die Juzo SoftCompress Einlage (wendbar) für den männlichen Genitalbereich wird in eine Kompressionsstrumpfhose eingelegt. Die breite Kanalstruktur dient der Druckerhöhung und der Steigerung des Lymphabflusses, während sich die schmalen Kanäle für das Reduzieren fibrotischer Verhärtungen eignen. Zusätzlich wird bei Genitalödemen für eine gezielte Druckerhöhung und eine ideale Druckverteilung gesorgt.



## Juzo SoftCompress Einlage für die Kniekehle

Art. 6845

Die Juzo SoftCompress Einlage dient zur Abpolsterung der Kniekehle.



## Juzo SoftCompress Einlage für die Ellenbeuge

Art. 6842

Die Juzo SoftCompress Einlage dient zur Abpolsterung der Ellenbeuge.



### Juzo SoftCompress Pelotten für die Fußknöchel

Art. 6843

Die Juzo SoftCompress Pelotten für die Fußknöchel dienen zur Abpolsterung der Bisgaard'schen Kulissen im Knöchelbereich. Dies sorgt für gezielte Druckerhöhung und ideale Druckverteilung. Die Pelotten werden paarweise ausgeliefert.



### Juzo SoftCompress Handkomresse

Art. 6844

Die Juzo SoftCompress Handkomresse ist eine spezielle Handrückenpelotte mit zwei Fingeröffnungen. Sie sorgt für gezielte Druckerhöhung und ideale Druckverteilung.



### Juzo SoftCompress Kurzzugbinden

Art. 6846

Die Kurzzugbinden bestehen aus 100 % Baumwolle und ermöglichen Kompressionsverbände mit niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck. Sie sind bis 95 °C waschbar und mit Wasserdampf (121 °C) sterilisierbar.



### Juzo SoftCompress Rapidelast V Mullbinden

Art. 6847/6848

Die Rapidelast V Mullbinden bestehen aus 60 % Polyamid und 40 % Viskose. Sie dienen zur Fixierung von Kompressen und Polstermaterial vor allem auf empfindlicher Haut oder an Gelenken – ohne den Bewegungsspielraum einzuschränken. Verbände mit Rapidelast V sind rutschfest. Die hohe Elastizität des Gewebes macht seine Anwendung schnell und einfach.



### Juzo SoftCompress Schlauchverband

Art. 6849

Der Schlauchverband besteht aus 100 % Baumwolle und ist besonders dehnfähig und hautfreundlich. Er schützt die Haut ohne einzuschnüren und kann auch zum Fixieren von Einlagen verwendet werden.

## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN	
		Seriengrößen	Maßanfertigung
<b>6837</b>	<b>Brusttrichter</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	Cup A – B Cup C – D Cup E – F	Größe 1 · 13505919 Größe 2 · 13505925 Größe 3 · 13505931	keine PZN
<b>6838</b>	<b>Brustbandage</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F	Größe 1 · 13505859 Größe 2 · 13505865 Größe 3 · 13505871 Größe 4 · 13505888 Größe 5 · 13505894 Größe 6 · 13505902	keine PZN
<b>6839</b>	<b>Genitaleinlage für Frauen</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	20 x 20 cm 30 x 28 cm 40 x 32 cm	Größe 1 · 13505977 Größe 2 · 13505983 Größe 3 · 13506008	keine PZN
<b>6840</b>	<b>Genitaleinlage für Männer</b> (für KPE Phase 1 und 2)		
	20 x 28 cm 23 x 30 cm 26 x 32 cm	Größe 1 · 13505948 Größe 2 · 13505954 Größe 3 · 13505960	keine PZN
<b>6842</b>	<b>Einlage für die Ellenbeuge</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	10 x 13 cm (Maßanfertigung max. 13 x 16 cm)	13506020	keine PZN
<b>6843</b>	<b>Pelotten für die Fußknöchel</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	6,5 x 9 cm Paarweise verpackt	13506250	–
<b>6844</b>	<b>Handkomresse</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	8,5 x 24 cm	13506037	keine PZN
<b>6845</b>	<b>Einlage für die Kniekehle</b> (für KPE Phase 1 und 2)	<b>Universalgröße</b>	
	13 x 17 cm (Maßanfertigung max. 19 x 23 cm)	13506014	keine PZN
Art.	Ausführung	PZN	
		Stück	Karton
<b>6846</b>	<b>Kurzzugbinde</b> (für KPE Phase 1)		<b>10 Stück</b>
	6 cm x 5 m 8 cm x 5 m 10 cm x 5 m 12 cm x 5 m	13506215 13506190 13506178 13506184	13506161 13506149 13506126 13506132
	<b>Rapidelast V Mullbinde</b> (für KPE Phase 1)		<b>20 Stück</b>
<b>6847</b>	6 cm x 4 m (für die Finger)	–	13506267
<b>6848</b>	4 cm x 4 m (für die Zehen)	–	13506273
<b>6849</b>	<b>Schlauchverband</b> (für KPE Phase 1)		
	6 cm x 20 m 8 cm x 20 m 10 cm x 20 m	13506296 13506304 13506310	– – –

## Größentabellen

### Juzo SoftCompress Brusttrichter

Art. 6837	Seriengrößen	Cup
	1	A – B
	2	C – D
	3	E – F

### Juzo SoftCompress Brustbandage

Art. 6838	Seriengrößen	Cup	Brustumfang in cm	Unterbrustumfang in cm
	1	A	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	2	B	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	3	C	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	4	D	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	5	E	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0
	6	F	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0

### Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Frauen

Art. 6839	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20,0 x 20,0
	2	30,0 x 28,0
	3	40,0 x 32,0

### Juzo SoftCompress Genitaleinlage für Männer

Art. 6840	Seriengrößen	Maße in cm (Breite x Höhe)
	1	20,0 x 28,0
	2	23,0 x 30,0
	3	26,0 x 32,0



# Medizinische adaptive Kompressionssysteme

## Juzo ACS Light und Juzo Compression Wrap

Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) können in der Therapiephase der Entstauung als effiziente Alternative zu herkömmlichen Kompressionsbinden eingesetzt werden. Die innovativen Produkte ermöglichen es dem medizinischen Fachpersonal, zeit- und kostensparend zu arbeiten<sup>1</sup> und effektiv die Entstauungstherapie zu begünstigen<sup>2</sup>. Zudem kann der Therapieerfolg der manuellen Lymphdrainage durch die Selbsttherapie des Patienten unterstützt werden. Die Kompressionssysteme können Tag und Nacht getragen werden und lassen sich individuell an den Patienten anpassen – auch bei sich verändernden Umfängen während der Therapie. Durch die einfache Handhabung können Patienten die Klettverschlüsse während des Tragens selbst nachjustieren, sodass die Kompressionswirkung bei fortschreitender Entstauung optimal aufrechterhalten werden kann<sup>3</sup>. Offene Wunden müssen zunächst mit einem Wundverband abgedeckt werden, bevor das Kompressionssystem angelegt wird. Das Tragen eines Unterziehstrumpfs (z.B. Juzo Liner) ist bei den Segmenten der unteren Extremität grundsätzlich empfehlenswert. Alternativ bietet die Kombination mit Juzo SoftCompress Bandagehilfen (S. 8) eine ideale Versorgungsmöglichkeit, die den Therapieerfolg zusätzlich begünstigt.

### Eigenschaften

- + Sehr kurzzeitig
- + Material besonders strapazierfähig
- + Kann Tag und Nacht getragen werden
- + Während des Tragens anpassbar – für optimale Kompression
- + Selbstständige Anwendung – auch bei eingeschränkter Beweglichkeit und Kraft
- + Einfach anzuziehen durch den Patienten
- + Diverses Zubehör erhältlich
- + **Medizinische adaptive Kompressionssysteme können auch mit Juzo SoftCompress Produkten kombiniert werden**

### Indikationen

- Lymphödem
- Lipödem
- Phlebödem
- Ulcus cruris venosum
- Post-traumatisches Ödem
- Post-operatives Ödem
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Post-thrombotisches Syndrom
- Chronisch venöse Insuffizienz
- Primäre und sekundäre Varikosis
- Immobilitätsödem
- Berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)

### Kontraindikationen

Siehe Seite 36

<sup>1</sup> Dissemond, S. et al.: Praxisrelevante Aspekte der Kompressionstherapie für Patienten mit chronischem Ulcus cruris unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. WUNDmanagement 2018; 12(2) 77-84.

<sup>2</sup> Damstra, R. & Partsch, H.: Randomized controlled trial comparing the effectiveness of adjustable compression Velcro wraps versus inelastic multicomponent compression bandages in the initial treatment of leg lymphedema. Journal of Vascular Surgery 2013; 1(1) 13-19.

<sup>3</sup> Mosti, G. & Partsch, H.: Druckmessungen unter Klettverschluss-Kompression. Vasomed 2017; 29(5) 212-216.

# Juzo ACS Light

## Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Durch seine kurzzügigen Eigenschaften wird mit dem ACS Light ein niedriger Ruhedruck und ein hoher Arbeitsdruck erzielt. Die einzelnen Segmente sind durch das eingearbeitete Inlett (Fixierhilfe) leicht anzulegen. Durch die Haftbänder am oberen Ende eines Segmentes wird zu jeder Zeit ein guter Halt gewährleistet. Nicht zuletzt erhöht das angenehme Material die Therapietreue und unterstützt den Patienten bei der Selbsttherapie.

### Eigenschaften

- + Kompressionsdruck bis zu 40 mmHg
- + Während des Tragens anpassbar – für optimale Kompression
- + Perfekter Halt durch innen liegende Haftbänder
- + Einfach anzuziehen durch den Patienten dank der eingearbeiteten Fixierhilfe
- + Diverses Zubehör erhältlich
- + Desinfektion und Aufbereitung möglich\*
- + **Juzo ACS Light Segmente können auch mit Juzo SoftCompress Produkten kombiniert werden**

### Materialzusammensetzung

85 % Polyamid, 15 % Elasthan

### Kontraindikationen

Siehe Seite 36

### Farben



Hoher  
Arbeitsdruck



Seriengrößen



### Klettverschlüsse

Mithilfe der Klettverschlüsse können die Produkte an verschiedene und sich verändernde Körperumfänge angepasst werden.



### Sicherer Halt

Dank des eingearbeiteten Inletts (Fixierhilfe) sind die Segmente im Handumdrehen angelegt und sitzen perfekt. Der eingenahte Haftband verhindert ein Verrutschen.



### Tragekomfort

Eine separat beigelegte Pelotte beim Arm- und Handsegment bietet zusätzlichen Komfort.



### Anatomische Passform

Die Kompressionssegmente sind optimal an die verschiedenen Körperregionen angepasst. Die Segmente für Unterschenkel, Oberschenkel und Arm sind jeweils für links und rechts erhältlich.

\* Die Produkte wurden gemäß DIN ISO TS 15883-5, SOD 19-002, EN ISO 17664, SOD 19-01 und der Richtlinie des Robert-Koch-Institutes „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ erfolgreich geprüft.

# Untere Extremität

Juzo ACS Light medizinische adaptive Kompressionssysteme für die untere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Fuß, Unterschenkel oder dem gesamten Bein eingesetzt werden können. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Unterschenkel und Fuß können kombiniert werden. Bei Bedarf können zusätzlich das Knie- und Oberschenkelsegment für die Versorgung des gesamten Beines hinzugefügt werden. Als Unterziehstrumpf empfiehlt sich der separat erhältliche Juzo Liner.





## Juzo ACS Light Oberschenkelsegment

- + Mit eingenähtem Hafrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Inklusive lose Extender (Verlängerung)
- + Jeweils für links und rechts erhältlich



## Juzo ACS Light Kniesegment

- + Mit eingenähtem Hafrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Komfortable Aussparungen an Patella und Kniekehle
- + Links und rechts tragbar



## Juzo ACS Light Unterschenkelsegment

- + Mit eingenähtem Hafrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Jeweils für links und rechts erhältlich



## Juzo ACS Light Fußsegment

- + Links und rechts tragbar
- + Mit eingearbeiteten Malleo-Pelotten
- + Inklusive lose Extender zur Druckverstärkung



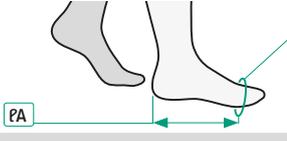
Videos zum korrekten Anlegen der Juzo ACS Light Segmente finden Sie unter [www.juzo.de/acslight](http://www.juzo.de/acslight)

## Lieferprogramm

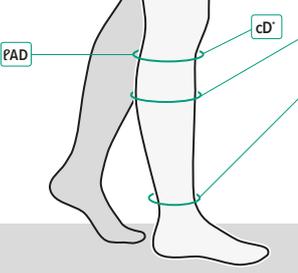
Art.	Ausführung Längen in cm	PZN							
		Seriengrößen							
J701LI	Fußsegment	Beige		Schwarz					
		Größe 1 · 13885141 Größe 2 · 13885129 Größe 3 · 13885112 Größe 4 · 13885046 Größe 5 · 13885135		Größe 1 · 13575417 Größe 2 · 13575392 Größe 3 · 13575386 Größe 4 · 13575334 Größe 5 · 13575400					
J702LI	Unterschenkelsegment	Beige/links		Beige/rechts		Schwarz/links		Schwarz/rechts	
		Größe 1 · 13884928 Größe 2 · 13884905 Größe 3 · 13884897 Größe 4 · 13884880 Größe 5 · 13884911		Größe 1 · 13884992 Größe 2 · 13884957 Größe 3 · 13884940 Größe 4 · 13884934 Größe 5 · 13884986		Größe 1 · 13575222 Größe 2 · 13575191 Größe 3 · 13575185 Größe 4 · 13575179 Größe 5 · 13575216		Größe 1 · 13575280 Größe 2 · 13575251 Größe 3 · 13575245 Größe 4 · 13575239 Größe 5 · 13575268	
J703LI	Knie	Beige		Schwarz					
		Größe 1 · 13885230 Größe 2 · 13885218 Größe 3 · 13885201 Größe 4 · 13885193 Größe 5 · 13885224		Größe 1 · 13575475 Größe 2 · 13575452 Größe 3 · 13575446 Größe 4 · 13575423 Größe 5 · 13575469					
J704LI	Oberschenkelsegment	Beige/links		Beige/rechts		Schwarz/links		Schwarz/rechts	
		Größe 1 · 13885402 Größe 2 · 13885388 Größe 3 · 13885371 Größe 4 · 13885365 Größe 5 · 13885394		Größe 1 · 13885454 Größe 2 · 13885431 Größe 3 · 13885425 Größe 4 · 13885419 Größe 5 · 13885448		Größe 1 · 13575630 Größe 2 · 13575593 Größe 3 · 13575587 Größe 4 · 13575570 Größe 5 · 13575624		Größe 1 · 13575699 Größe 2 · 13575676 Größe 3 · 13575653 Größe 4 · 13575647 Größe 5 · 13575682	
J704LI	Oberschenkelsegment	Beige/links		Beige/rechts		Schwarz/links		Schwarz/rechts	
		Größe 1 · 13885804 Größe 2 · 13885721 Größe 3 · 13885715 Größe 4 · 13885709 Größe 5 · 13885796		Größe 1 · 13885744 Größe 2 · 13885773 Größe 3 · 13885767 Größe 4 · 13885750 Größe 5 · 13885738		Größe 1 · 13576032 Größe 2 · 13575943 Größe 3 · 13575937 Größe 4 · 13575920 Größe 5 · 13576026		Größe 1 · 13575972 Größe 2 · 13576003 Größe 3 · 13575995 Größe 4 · 13575989 Größe 5 · 13575966	

## Größentabellen

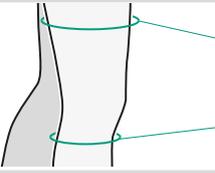
### Juzo ACS Light Fußsegment

Art. J701LI	Umfang c Länge ℓ	Seriengrößen - Maße in cm					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cA	Zehengrundgelenk	22,0 – 24,0	25,0 – 27,0	28,0 – 30,0	31,0 – 34,0	35,0 – 40,0
	pA	normal	16,5	18,0	19,5	21,0	23,0
		lang	18,5	20,0	21,5	23,0	25,0

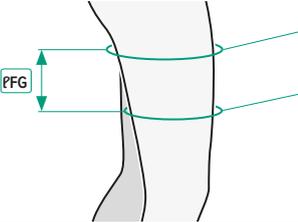
### Juzo ACS Light Unterschenkelsegment

Art. J702LI	Umfang c Länge ℓ	Seriengrößen - Maße in cm						
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL		
	cD	cC	stärkste Stelle Wade	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0
	pAD	cB	Fußgelenk	20,0 – 27,0	25,0 – 32,0	30,0 – 38,0	37,0 – 44,0	45,0 – 52,0
		normal	37,0	37,0	42,0	42,0	44,0	
		lang	42,0	42,0	47,0	47,0	49,0	
		* unterhalb Kniescheibe						

### Juzo ACS Light Kniesegment

Art. J703LI	Umfang c	Seriengrößen - Maße in cm					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cF	10 cm oberhalb Kniescheibe	40,0 – 55,0	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 85,0	85,0 – 100,0
	cD	unterhalb Kniescheibe	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0

### Juzo ACS Light Oberschenkelsegment

Art. J704LI	Umfang c Länge ℓ	Seriengrößen - Maße in cm						
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL		
	cG	stärkste Stelle Oberschenkel	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 80,0	75,0 – 90,0	85,0 – 100,0	
	pFG	cF	10 cm oberhalb Kniescheibe	45,0 – 52,0	53,0 – 59,0	60,0 – 66,0	67,0 – 73,0	74,0 – 80,0
		normal	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
	lang	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0		

# Obere Extremität

Juzo ACS Light medizinische adaptive Kompressionssysteme für die obere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Arm und Hand eingesetzt werden. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Arm und Hand können kombiniert werden. Das Handsegment ist besonders zur Behandlung von Ödemen im Bereich des Handrückens geeignet.



**Juzo ACS Light Armsegment**

- + Mit eingenähtem Haftrand
- + Mit eingearbeitetem Inlett (Fixierhilfe)
- + Mit seitlicher Überhöhung
- + Inklusive loselem Extender (Verlängerung der oberen Lasche)
- + Jeweils für links und rechts erhältlich

**Juzo ACS Light Handsegment**

- + Links und rechts tragbar
- + Inklusive Handpelotten zur individuellen Druckverstärkung am Handrücken



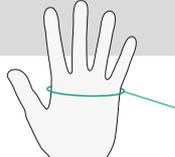
Videos zum korrekten Anlegen der Juzo ACS Light Segmente finden Sie unter [www.juzo.de/acslight](http://www.juzo.de/acslight)

## Lieferprogramm

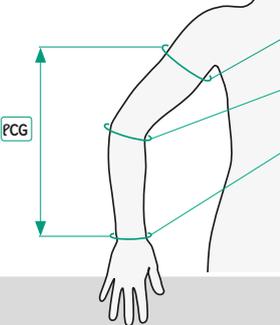
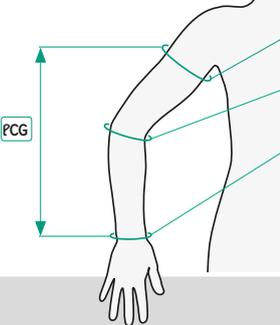
Art.	Ausführung Längen in cm	PZN			
		Seriengrößen			
 J705LI	<b>Handsegment</b>	<b>Beige</b>		<b>Schwarz</b>	
	normal	Größe 1 · 13885187 Größe 2 · 13885170 Größe 3 · 13885164 Größe 4 · 13885158	Größe 1 · 12598698 Größe 2 · 12598675 Größe 3 · 12598652 Größe 4 · 12598623		
 J706LI	<b>Armsegment</b>	<b>Links</b>	<b>Rechts</b>	<b>Schwarz/links</b>	<b>Schwarz/rechts</b>
	normal 42,0 – 47,0  lang 46,0 – 50,0	Größe 1 · 13885282 Größe 2 · 13885276 Größe 3 · 13885253 Größe 4 · 13885247 Größe 5 · 13891727  Größe 1 · 13885690 Größe 2 · 13885626 Größe 3 · 13885603 Größe 4 · 13885589 Größe 5 · 13891762	Größe 1 · 13885336 Größe 2 · 13885313 Größe 3 · 13885307 Größe 4 · 13885299 Größe 5 · 13891733  Größe 1 · 13885655 Größe 2 · 13885684 Größe 3 · 13885678 Größe 4 · 13885661 Größe 5 · 13891779	Größe 1 · 13575512 Größe 2 · 13575506 Größe 3 · 13575498 Größe 4 · 13575481 Größe 5 · 13889995  Größe 1 · 13575914 Größe 2 · 13575831 Größe 3 · 13575825 Größe 4 · 13575819 Größe 5 · 13890030	Größe 1 · 13575558 Größe 2 · 13575541 Größe 3 · 13575535 Größe 4 · 13575529 Größe 5 · 13890024  Größe 1 · 13575848 Größe 2 · 13575883 Größe 3 · 13575877 Größe 4 · 13575860 Größe 5 · 13890047

## Größentabellen

### Juzo ACS Light Handsegment

Art. J705LI	Umfang c	Seriengrößen - Maße in cm			
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L
 cA Fingergrundgelenke		< 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	> 22,0

### Juzo ACS Light Armsegment

Art. J706LI	Umfang c Länge ℓ	Seriengrößen - Maße in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
 cG Oberarm		25,0 – 28,0	29,0 – 33,0	34,0 – 39,0	40,0 – 45,0	46,0 – 50,0
cE Ellbogen		23,0 – 26,0	26,0 – 30,0	29,0 – 34,0	33,0 – 39,0	38,0 – 42,0
cC Handgelenk		14,0 – 16,0	17,0 – 19,0	20,0 – 22,0	23,0 – 25,0	24,0 – 27,0
PCG 	normal	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0
	lang	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0

# Zubehör

Für Juzo ACS Light sind verschiedene Zusatzprodukte für sicheren Halt, zusätzlichen Tragekomfort und die Versorgung größerer Umfänge erhältlich. Sie sind einfach anzuwenden und eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten.



## Juzo ACS Light Hüftband

Art. J711

Das Juzo ACS Light Hüftband kann bei Bedarf zur Fixierung des Oberschenkelsegments eingesetzt werden.



## Juzo ACS Light Zusatzband

Art. J712

Das Juzo ACS Light Zusatzband wurde speziell für die Kompression des Rumpfes (z.B. Thorax, Hüfte, Bauch und/oder Genitalbereich) entwickelt. Es kann individuell zugeschnitten werden und ist dank der universell einsetzbaren Klettverschlüsse einfach anzulegen.



## Juzo ACS Light Klettverschlussplatte

Art. J713

Die Juzo ACS Light Klettverschlussplatte ermöglicht ein individuelles Zuschneiden von zusätzlichen Klettverschlüssen.



## Juzo ACS Light Pelotten

Art. J714

Die Juzo ACS Light Pelotten können zur zusätzlichen Polsterung für mehr Tragekomfort und/oder zur lokalen Druckerhöhung eingesetzt werden.



## Juzo ACS Light Antirutsch-Band

Art. J715

Das individuell kürzbare Juzo ACS Light Antirutsch-Band bietet eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit. Es kann unter dem Zusatzband oder Hüftband, aber auch unter dem Oberschenkelsegment getragen werden – für optimalen Halt.



## Juzo ACS Light Extender

Art. J716

Der Juzo ACS Light Extender dient zur Verstärkung der Kompression an den Extremitäten (z. B. Sprunggelenk, Hand- oder Fußrücken).

## Lieferprogramm

Art.	Ausführung	PZN	
<b>J711</b>	<b>Hüftband</b>	<b>Universalgröße - Beige</b>	<b>Universalgröße - Schwarz</b>
	Hüftteil mit aufgenähtem Microklett Separater Taillengurt inkl. 1 losem Klettverschluss <b>Farben:</b> Beige, Schwarz	13884874	13575162
<b>J712</b>	<b>Zusatzband</b>	<b>Seriengrößen - Beige</b>	<b>Seriengrößen - Schwarz</b>
	Zusätzliches Band inkl. 6 losen Klettverschlüssen <b>Farben:</b> Beige, Schwarz	Größe 1 - 13885810 Größe 2 - 13885827	Größe 1 - 13576049 Größe 2 - 13576055
<b>J713</b>	<b>Klettverschlussplatte</b>	<b>Universalgröße - Beige</b>	<b>Universalgröße - Schwarz</b>
	Individuell zuschneidbar <b>Farben:</b> Beige, Schwarz	13885833	13576109
<b>J714</b>	<b>Pelotten</b> Farben:	<b>Seriengrößen - Grau</b>	
	Set mit 2 Stärken <b>Farbe:</b> Grau	Größe 1 - 13576061 Größe 2 - 13576078 Größe 3 - 13576084 Größe 4 - 13576090	
<b>J715</b>	<b>Antirutsch-Band</b>	<b>Universalgröße - Beige</b>	<b>Universalgröße - Schwarz</b>
	Band mit einseitiger Neopren-Beschichtung, 12 x 120 cm, inkl. 6 losen Klettverschlüssen <b>Farben:</b> Beige, Schwarz	13884868	13575156
<b>J716</b>	<b>Extender</b>	<b>Universalgröße - Beige</b>	<b>Universalgröße - Schwarz</b>
	Verlängerungsband mit aufgenähten Klettstreifen inkl. 2 losen Klettverschlüssen <b>Farben:</b> Beige, Schwarz	13885000	12599284

## Größentabellen

### Juzo ACS Light Zusatzband

Art. J712	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
	1	140,0 x 12,0
	2	140,0 x 20,0

### Juzo ACS Light Pelotten

Art. J714	Seriengrößen	Maße in cm (Länge x Breite)
<b>Stärke in mm:</b> 4,0 und 8,0  	1	9,0 x 9,0
	2	10,0 x 10,0
	3	11,0 x 11,0
	4	12,0 x 12,0

# Juzo Compression Wrap

## Medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK)

Dank ihrer außerordentlich kurzzügigen Eigenschaften verfügen die Juzo Compression Wrap Produkte über einen sehr hohen Arbeitsdruck und einen niedrigen Ruhedruck. Durch die doppelseitigen Klettverschlüsse und die hilfreichen Griffzonen sind sie leicht anzulegen und können ideal an schwankende Körperumfänge angepasst werden. Die speziellen Einkerbungen an den Laschen ermöglichen einen lückenlosen Verschluss, sodass der Entstehung von Fensterödemen vorgebeugt wird. Das Besondere: Die Farbe kann individuell nach Patientenwunsch von Beige auf Schwarz gewendet werden.

### Eigenschaften

- + Variabler Kompressionsdruck 30 – 60 mmHg
- + Individuell verstellbar für die Versorgung von schwankenden Beinumfangen
- + Spezielle Einkerbungen sorgen für eine optimale Überlappung der Laschen und beugen so der Entstehung von Fensterödemen vor
- + Griffzonen am oberen und unteren Ende erleichtern das Anlegen
- + Farbe kann individuell nach Patientenwunsch von Beige auf Schwarz gewendet werden
- + **Juzo Compression Wrap Segmente können auch mit Juzo SoftCompress Produkten kombiniert werden**

### Materialzusammensetzung

Außenmaterial: 88 % Polyamid, 12 % Elasthan  
Innenmaterial: 100 % Neopren

### Kontraindikationen

Siehe Seite 36

### Farbe



Beige / Schwarz



Sehr hoher Arbeitsdruck



Wendbar



Seriengrößen



### Klettverschlüsse

Mithilfe der doppelseitigen Klettverschlüsse können die Produkte an verschiedene und sich verändernde Körperumfänge angepasst werden.



### Spezielle Einkerbungen

Dank dieser Vorrichtung an den Laschen wird der Entstehung von Fensterödemen vorgebeugt. Die Einkerbungen sorgen dafür, dass die einzelnen Laschen lückenlos überlappen.



### Hilfreiche Griffzonen

Eine praktische Zone am oberen und unteren Ende erleichtert das Schließen der Laschen.



### Individuelle Farbauswahl

Durch die spezielle Materialverarbeitung kann die Farbe von Beige auf Schwarz gewendet werden

# Untere Extremität

Juzo Compression Wrap medizinische adaptive Kompressionssysteme für die untere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Fuß, Unterschenkel oder dem gesamten Bein eingesetzt werden können. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Unterschenkel und Fuß können kombiniert werden.

**NEU ab 01.01.2020:** Bei Bedarf können zusätzlich das Knie- und Oberschenkelsegment für die Versorgung des gesamten Beines hinzugefügt werden. Als Unterziehstrumpf empfiehlt sich der separat erhältliche Juzo Liner.



### Juzo Compression Wrap Oberschenkelsegment

- + Spezielle Einkerbungen ermöglichen optimale Überlappung
- + Griffzonen für leichteres Anlegen
- + Links und rechts tragbar
- + Farbe kann von beige auf schwarz gewendet werden

### Juzo Compression Wrap Kniesegment

- + Spezielle Einkerbungen ermöglichen optimale Überlappung
- + Griffzonen für leichteres Anlegen
- + Links und rechts tragbar
- + Farbe kann von beige auf schwarz gewendet werden

### Juzo Compression Wrap Unterschenkelsegment

- + Inklusive Unterziehstrumpf
- + Spezielle Einkerbungen ermöglichen optimale Überlappung
- + Griffzonen für leichteres Anlegen
- + Links und rechts tragbar
- + Farbe kann von beige auf schwarz gewendet werden

### Juzo Compression Wrap Fußsegment

- + Spezielle Einkerbungen ermöglichen optimale Überlappung
- + Griffzonen für leichteres Anlegen
- + Links und rechts tragbar
- + Farbe kann von beige auf schwarz gewendet werden



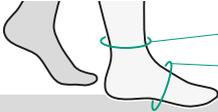
Videos zum korrekten Anlegen der Juzo Compression Wrap Segmente finden Sie unter [www.juzo.de/compression-wrap](http://www.juzo.de/compression-wrap)

## Lieferprogramm

	Art. Länge in cm	Ausführung	Einheit	Seriengrößen	PZN
	<b>6000LF</b>	<b>Fußsegment</b>	Stück	Größe 2 – 4	Größe 2 · 13580683 Größe 3 · 13580677 Größe 4 · 13580660
	<b>6000LC</b>	<b>Wadensegment</b>	Stück	Größe 2 – 7	Größe 2 · 13580631 Größe 3 · 13580594 Größe 4 · 13580542 Größe 5 · 13580648 Größe 6 · 13580654 Größe 7 · 14175186
	normal < 40				Größe 2 · 13580571 Größe 3 · 13580565 Größe 4 · 13580559 Größe 5 · 13580588 Größe 6 · 13580424 Größe 7 · 14175200
	lang > 40				
	<b>6000LCM</b>	<b>Wadensegment max.</b>	Stück	Größe 2 – 7	Größe 2 · 13580625 Größe 3 · 13580619 Größe 4 · 13580602 Größe 5 · 13580430 Größe 6 · 13580418 Größe 7 · 14175192
	normal < 40				Größe 2 · 13580482 Größe 3 · 13580453 Größe 4 · 13580447 Größe 5 · 13580401 Größe 6 · 13580708 Größe 7 · 14175217
	lang > 40				
	<b>6000LK</b>	<b>Kniesegment <span style="color: green;">NEU</span> ab 01.01.2020</b>	Stück	Größe 2 – 7	Größe 2 · 16143405 Größe 3 · 16143397 Größe 4 · 16143380 Größe 5 · 16143411 Größe 6 · 16143428 Größe 7 · 16143434
	<b>6000LCM</b>	<b>Oberschenkelsegment <span style="color: green;">NEU</span> ab 01.01.2020</b>	Stück	Größe 2 – 6	Größe 2 · 16143486 Größe 3 · 16143457 Größe 4 · 16143440 Größe 5 · 16143492 Größe 6 · 16143523
	normal < 25 lang > 30				Größe 2 · 16143569 Größe 3 · 16143552 Größe 4 · 16143546 Größe 5 · 16143575 Größe 6 · 16143581

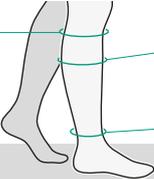
## Größentabellen

### Juzo Compression Wrap Fußsegment

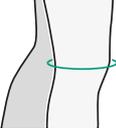
Art. 6000 LF	Seriengrößen · Umfänge in cm		
	2 / S	3 / M	4 / L
 <b>cB</b>	15,0 – 23,0	20,0 – 28,0	25,0 – 33,0
 <b>cA'</b>	19,0 – 24,0	24,0 – 29,0	29,0 – 34,0

\* 6 cm proximal des Kleinzehengrundgelenks

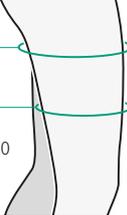
### Juzo Compression Wrap Wadensegment

Art. 6000 LC / LCM Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL
 <b>cC</b>	29,0 – 35,0	34,0 – 40,0	37,0 – 44,0	41,0 – 48,0	46,0 – 53,0	50,0 – 60,0
<b>normal</b> < 40,0	35,0 – 41,0	40,0 – 46,0	44,0 – 51,0	48,0 – 55,0	53,0 – 60,0	60,0 – 70,0
<b>lang</b> > 40,0	18,0 – 21,0	21,0 – 24,0	24,0 – 27,0	27,0 – 31,0	31,0 – 35,0	36,0 – 47,0

### Juzo Compression Wrap Kniesegment

Art. 6000 LK	Seriengrößen · Umfänge in cm					
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL
 <b>cE</b>	30,0 – 36,0	36,0 – 42,0	42,0 – 48,0	48,0 – 55,0	55,0 – 62,0	62,0 – 70,0

### Juzo Compression Wrap Oberschenkelsegment

Art. 6000 LT Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm				
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
 <b>cG</b>	43,0 – 70,0	54,0 – 81,0	65,0 – 92,0	75,0 – 102,0	85,0 – 112,0
<b>normal</b> < 25,0	35,0 – 55,0	48,0 – 70,0	60,0 – 82,0	70,0 – 92,0	80,0 – 102,0
<b>lang</b> > 30,0					

# Obere Extremität

Juzo Compression Wrap medizinische adaptive Kompressionssysteme für die obere Extremität sind kurzzügige Segmente, die zur Ödemreduzierung an Arm und Hand eingesetzt werden. Durch ihre verstellbaren Gurte lassen sie sich an unterschiedliche, auch sich während der Therapie verändernde Umfänge anpassen. Sie eignen sich auch sehr gut für die Selbstbandagierung des Patienten. Die Segmente für Arm und Hand können kombiniert werden. Das Handsegment ist besonders zur Behandlung von Ödemen im Bereich des Handrucksens geeignet.





### Juzo Compression Wrap Armsegment

- + Mit eingearbeitem Inlett (Fixierhilfe)
- + Spezielle Einkerbungen ermöglichen optimale Überlappung
- + Links und rechts tragbar
- + Beidseitig verwendbar, dadurch Farbe individuell wählbar

NEU



### Juzo Compression Wrap Handsegment

- + Spezielle Einkerbungen ermöglichen optimale Überlappung
- + Jeweils für links oder rechts erhältlich
- + Seitenauswahl entsprechend der gewünschten Farbe\*

NEU

#### \*Bitte beachten:

Um einen optimalen Tragekomfort zu erzielen, muss die Seitenauswahl des Handsegments (rechts oder links) entsprechend der Farbe vorgenommen werden. Wird das Handsegment mit der beigen Seite nach außen getragen, wird die gewünschte Seite bei der Bestellung ausgewählt. Wird die schwarze Seite nach außen getragen, muss die entgegengesetzte Seite bestellt werden.

#### Beispiel:

Gewünscht ist ein Handsegment Gr. M für die **linke Hand**:

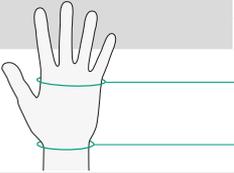
- Bestellung in **beige**: 6000 UHL Gr. M **links**
- Bestellung in **schwarz**: 6000 UHR Gr. M **rechts**

## Lieferprogramm

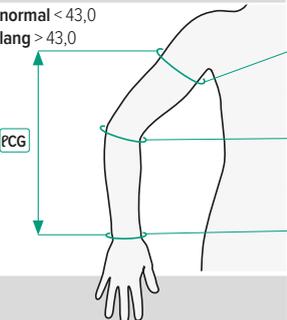
Art.	Ausführung	PZN	
Längen in cm			
 <b>6000UHL</b>	<b>Handsegment NEU ab 01.01.2020</b>		
beige: links schwarz: rechts		Größe 1 · 16143730 Größe 2 · 16143718 Größe 3 · 16143701	Größe 4 · 16143693 Größe 5 · 16143724
 <b>6000UHR</b>	<b>Handsegment NEU ab 01.01.2020</b>		
beige: rechts schwarz: links		Größe 1 · 16143813 Größe 2 · 16143782 Größe 3 · 16143776	Größe 4 · 16143747 Größe 5 · 16143799
 <b>6000UA</b>	<b>Armsegment NEU ab 01.01.2020</b>		
normal < 43		Größe 1 · 16143635 Größe 2 · 16143612 Größe 3 · 16143606	Größe 4 · 16143598 Größe 5 · 16143629
lang > 43		Größe 1 · 16143687 Größe 2 · 16143664 Größe 3 · 16143658	Größe 4 · 16143641 Größe 5 · 16143670
 <b>6000F1</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		
Größe: 40 mm	Fuß, Hand	16143836	
 <b>6000F2</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		
Größe: 75 mm	Wade	16143842	
 <b>6000F3</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		
Größe: 85 mm	Wade lang, Arm	16143859	
 <b>6000F4</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		
Größe: 95 mm	Knie, Oberschenkel, Arm lang	16143865	
 <b>6000F5</b>	<b>Klettverschlüsse</b>		
Größe: 105 mm	Oberschenkel lang	16143871	

## Größentabellen

### Juzo Compression Wrap Handsegment

Art. 6000 UH		Seriengrößen · Umfänge in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
<b>cA</b>		15,5 – 17,5	17,5 – 19,5	19,5 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 28,0
<b>cC</b>		13,0 – 17,0	15,0 – 19,0	17,0 – 21,5	20,0 – 24,0	21,0 – 25,0

### Juzo Compression Wrap Armsegment

Art. 6000 UA Längen in cm		Seriengrößen · Umfänge in cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
normal < 43,0 lang > 43,0	<b>cG</b>	27,0 – 36,0	30,0 – 39,0	33,0 – 44,0	35,0 – 49,0	40,0 – 56,0
<b>PCG</b>	<b>cE</b>	23,0 – 32,0	24,0 – 34,0	26,0 – 36,0	29,0 – 42,0	31,0 – 46,0
	<b>cC</b>	16,0 – 19,0	17,0 – 20,0	18,0 – 22,0	20,0 – 26,0	21,0 – 29,0

# Juzo Liner

## Unterziehstrumpf für medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK)



### Juzo Liner

Art. 6082

Juzo Liner ist ein Unterziehstrumpf für die Produkte Juzo ACS Light und Juzo Compression Wrap. Er schützt die empfindliche Haut und schützt eine ggf. vorhandene Wundauflage beim An- und Ausziehen der medizinischen adaptiven Kompressionssysteme. Der schwarze Strumpf wird als Paar geliefert. Juzo Liner ist jeweils in zwei verschiedenen Größen als Waden- und Schenkelstrumpf lieferbar.

### Farbe



Schwarz

## Lieferprogramm

Art. 6082	Form	Ausführung	PZN
	AD	Wadenstrümpfe	
		Set mit 2 Unterziehstrümpfen	Größe 1 · 13580298 Größe 2 · 13580306
	AG	Schenkelstrümpfe	
		Set mit 2 Unterziehstrümpfen	Größe 1 · 13580312 Größe 2 · 13580329

## Größentabelle

### Juzo Liner

Art. 6082 Längen in cm	Seriengrößen · Umfänge in cm	
	I / XS	II / S
<p><b>PG AG</b> normal 80,0</p> <p><b>cG</b></p>	50,0 – 75,0	76,0 – 99,0
<p><b>PD AD</b> normal 45,0</p> <p><b>cC</b></p>	29,0 – 48,0	48,0 – 69,0

# Juzo Liner Silver

## Unterziehstrumpf mit Silber



### Juzo Liner Silver

Art. 9640

Durch das weiche Gestrick sind diese Unterziehstrümpfe besonders angenehm zu tragen und eignen sich auch für das Tragen unter der Kompressionsbestrumpfung bei Patienten mit extrem empfindlicher Haut. Die Strümpfe bieten einen permanenten Hautschutz beim An- und Ausziehen und wirken dank des eingestrickten Silberfadens zusätzlich antibakteriell. Der Juzo Liner Silver eignet sich ideal für die Integration von Wundauflagen oder zur Fixierung spezieller Druckpelotten.

### Farbe



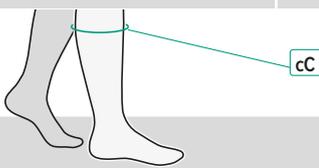
Silber

## Lieferprogramm

Art. 9640			PZN
	Form		
	AD	<b>Wadenstrümpfe</b>	
		Set mit 3 Unterziehstrümpfen	S / M: 10553757 L / XL: 10553786

## Größentabelle

### Juzo Liner Silver

Art. 9640	Seriengrößen · Umfänge in cm	
	S/M	L/XL
	< 50,0	> 50,0

# Zusätzliche Informationen

## Medizinische adaptive Kompressionssysteme

### Wann empfiehlt sich welches Produkt?

#### Juzo ACS Light

- Kompressionsdruck bis zu 40 mmHg
- Bei Nebenerkrankungen, welche einen geringeren Druck erfordern (z. B. leichte pAVK, periphere Neuropathie)
- Patienten die einen hohen Kompressionsdruck nicht tolerieren
- Bei anatomischen Formgebungen, die mehr Elastizität des Materials erfordern (z.B. bei ausgeprägten Hautlappen im Oberschenkelbereich)
- Zur temporären Erhöhung des Kompressionsdrucks einer Flachstrickversorgung

#### Juzo Compression Wrap

- Kompressionsdruck 30 – 60 mmHg
- Wenn ein sehr hoher Arbeitsdruck erforderlich ist (z. B. bei Ulcus cruris venosum)
- Bei ausgeprägten Fibrosen
- Bei sehr stark ausgeprägten Lymphödemen (z.B. bei primären Lymphödemen, bei Lymphödemen im Stadium II - III)



## Kontraindikationen

### Juzo SoftCompress, Juzo ACS Light und Juzo Compression Wrap

#### Absolute Kontraindikationen

- Mäßige bis schwere arterielle Erkrankungen (Knöchel-Arm-Index  $< 0,7$ )
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Schweres Akutes Erysipel
- Akute bakterielle, virale oder allergische Entzündungen
- Unbehandelte oder fortgeschrittene Hauterkrankungen/Kontaktenzyme
- Schwellungen der Extremität unbekannter Ursache

#### Relative Kontraindikationen

- Periphere Neuropathie bei Diabetes mellitus
- Sensibilitätsstörungen der Extremitäten
- Unverträglichkeit auf Druck oder Inhaltsstoffe des Produkts
- Primär chronische Polyarthrit

#### Wichtig

Bestehen offene Wunden im Versorgungsbereich, muss nach Rücksprache mit dem Arzt der Wundbereich zunächst mit einer entsprechenden Wundauflage bzw. einem Verband abgedeckt werden, bevor Juzo SoftCompress oder medizinische adaptive Kompressionssysteme von Juzo angelegt werden.

# Unterstützende Produkte für die Ödemtherapie

## Zusatzprodukte



### Juzo Lymph Lotion

Art. 9860

Feuchtigkeitsspendende Lotion mit 4 % Urea für die gezielte Hautpflege bei Lymph- und Lipödem



### Juzo Spezialwaschmittel

Art. 9000

Besonders mildes und ergiebiges Waschmittelkonzentrat zur schonenden Reinigung der Kompressionsbekleidung



### Juzo Spezialhandschuhe

Art. 9301

Textilhandschuh zum schonenden Anlegen und besseren Verteilen des Gestricks

## Lymphpads



### Juzo Lymphpad Line

Art. 9430

Behandlungshilfe für Lymph- und Lipödem zur Anregung der Mikrozirkulation im Gewebe



### Juzo Lymphpad Square

Art. 9431

Behandlungshilfe für Lymph- und Lipödem zur Anregung der Mikrozirkulation im Gewebe

## Tagebuch Lymphödem



### Hilfe beim Selbstmanagement: Das Juzo Tagebuch Lymphödem

Art. W334 LY

Mit diesem Tagebuch erhält der Patient die Möglichkeit, den Therapieverlauf selbst zu dokumentieren und zu verfolgen



# Juzo Lymphologische Symposien 2020

Für Mitarbeiter aus dem medizinischen Fachhandel, Ärzte und Therapeuten

Die Beratung und Versorgung von Ödempatienten erfordert in der Praxis fundiertes Wissen, Einfühlungsvermögen und ständige Weiterbildung. Die Juzo Akademie unterstützt Sie dabei und bietet Ihnen mit den überregionalen Symposien eine Plattform für den interdisziplinären und interprofessionellen Austausch. Informative Vorträge, interessante Workshops und anregende Diskussionen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr medizinisches und therapeutisches Fachwissen zu vertiefen. Seien auch Sie 2020 dabei!

Informieren Sie sich online und melden Sie sich an: [www.juzo.de/symposien](http://www.juzo.de/symposien)



**Juzo Kundenservice**

DE · Tel.: +49 (0)8251 901 0 · Fax: 0800 08 35 393 · E-Mail: [bestellung@juzo.de](mailto:bestellung@juzo.de)

**Julius Zorn GmbH** · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Deutschland · [info@juzo.de](mailto:info@juzo.de) · [www.juzo.de](http://www.juzo.de)

DEU · 14024001/10/11 · 8511 LY · 12/2019  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

